



Joustavan irtoproteesin valmistaminen:

- Proteesia jäljennettäessä tulisi käyttää mahdollisimman löysää jäljennösainetta.
- Suosittellemme jäljennöksen ottoa alginaatilla, mutta myös light body -kumipasta on ok.
- Purenta tulee olla tarkka, koska proteesi tehdään suoraan valmiiksi.

Joustavan irtoproteesin käyttöohjeet:

- Lämmitä proteesi niin kuumassa vedessä kuin hanasta tulee noin 1 minuutin ajan ennen suuhun laittamista (laita proteesi esim. kuppiin lämpenemään, huom. älä käytä kiehuvaa vettä).

Runkomateriaalin käsittely:

Jos jokin kohta on liian tiukka tai reuna liian pitkä voit freesata matalilla kierroksilla (8000-10000 kierrosta/min.) yhteen suuntaan kevyesti painaen. Näin muodostuu kiiltävä pinta eikä runkomateriaali sula.

- Freesaamiseen on todettu hyväksi Green mounted stone (yleensä käytetään posliinin hiomiseen).
- Pyyhi tai poista terävällä puukolla palkeenkielet.
- Kevennä esim. ruskealla kumilla, jos tarvetta on.

Joustava irtoproteesi valmistetaan nylonista ja on allergisoimaton!

InteraDent Finland Oy
Pispalan valtatie 136
33270 Tampere
p. 03-222 0027
interadent@interadent.fi
www.interadent.fi

InteraDent Helsinki
Kangasvuokontie 5
00930 Helsinki
p. 09-644 858
helsinki@interadent.fi