

Potilaalle joustavan proteesin hoito-ohjeet

- ✓ Puhdista joustava proteesi päivittäin. Huuhtele proteesi juoksevan veden alla 30-60 sekunnin ajan. Sen jälkeen käytä puhdistuskylvyssä, esimerkiksi Corega 3 min puhdistustabletteja ohjeen mukaan. Puhdistamiseen voi käyttää hyvin pehmeää hammasharjaa tai vanupuikkoa, kun peset proteesin juoksevan veden alla.
 - ✓ Huuhtele proteesi juoksevan veden alla ruokailun jälkeen.
 - ✓ Säilytä proteesi vedessä, kun et pidä sitä.
 - ✓ Puhdista omat hampaasi päivittäin lääkärin ohjeiden mukaan.
 - ✓ Proteesin suuhun laittoa helpottaa proteesin lämmitys juoksevan, kuuman hanaveden alla.
-
- Älä käytä hammastahnaa äläkä hammasharjaa, ettei pinta naarmuunnu.
 - Älä käytä valkaisuaineita sisältäviä proteesinpuhdistusaineita.
 - Älä anna proteesin kuivua, jos et käytä sitä.