

## Hoito-ohjeet joustavalle proteesille

Lämmitä joustava proteesi ennen ensimmäistä asetusta hyvin kuumassa hanavedessä 1 minuutin ajan.

- ✓ Puhdista joustava proteesi päivittäin. Huuhtele proteesi juoksevan veden alla 30-60 sekunnin ajan. Sen jälkeen käytä puhdistuskylvyssä esim. Corega 3 min puhdistustabletteja ohjeen mukaan. Voit käyttää vain hyvin pehmeää hammasharjaa tai vanupuikkoa ilman painetta juoksevan veden alla.
- ✓ Puhdista proteesi juoksevan veden alla ruokailun jälkeen.
- ✓ Säilytä proteesi vedessä, kun et pidä sitä.
- ✓ Puhdista omat hampaasi päivittäin lääkärin ohjeiden mukaan.
  
- Älä käytä hammastahnaa äläkä hammasharjaa, ettei pinta naarmuunnu.
- Älä käytä proteesinpuhdistusaineita, jotka sisältävät valkaisuaineita.
- Älä anna proteesin kuivua, jos et käytä sitä.
- Älä ole liian huoleton, vaikka runkomateriaali tuskin menee rikki, hampaat kuitenkin voivat lohjeta.