



Joustavan irtoproteesin valmistaminen:

- Proteesia jäljennettäessä tulisi käyttää mahdollisimman löysää jäljennösainetta. Suosittelemme jäljennöksen ottoa alginaatilla, mutta myös light body –kumipasta on ok.
- Purenta tulee olla tarkka, koska proteesi tehdään suoraan valmiiksi.
- Huomioi, että joustavia proteeseja ei voi pohjata, eikä niihin voi lisätä hampaita.

Joustavan irtoproteesin käyttöohjeet:

- Lämmitä proteesi niin kuumassa vedessä kuin hanasta tulee noin 1 minuutin ajan mallin päällä ennen suuhun laittamista (laita proteesi esim. kuppiin lämpenemään, huom. älä käytä kiehuvaa vettä).

Runkomateriaalin käsittely:

Runkomateriaalin käsittelyyn sopii esimerkiksi ”Finishing Set Quick 2” Erkodentin tuote. Plandentin tilauskoodi tälle lämpomuovattavien materiaalien työstämiseen tarkoitettulle setille on MD126239.

Joustava irtoproteesi valmistetaan nylonista ja on allergisoimaton!

InteraDent Finland Oy
Pispalan valtatie 136
33270 Tampere
p. 03-222 0027
interadent@interadent.fi
www.interadent.fi